

	Protocolo para el uso de Tapabocas	Versión:	V1
		Código:	TH-SST-PT-11
		Página:	1 de 1



Tipos de Tapabocas Utilizados		
Convencional	Tela	KN95

El uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de personas, en las instalaciones de la Fundación Santo Domingo, y en todo sitio en que se tenga contacto con personas.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

<p><b>Al colocarlo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lávese las manos.</li> <li>2. Ajústate el tapabocas lo más pegado a la cara y asegúrese que cubra desde la nariz hasta debajo del mentón.</li> <li>3. Sujétate las cintas detrás de las orejas o cabeza.</li> <li>4. Moldee la banda o costura a la nariz.</li> </ol>	<p><b>Al retirarlo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retírelo desde las cintas, nunca tocar la parte externa, procurar no tocar los ojos, nariz o boca.</li> <li>2. Doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro.</li> <li>3. Dépositalo en el sitio indicado, en caso de ser de tela guárdelo en una bolsa y ciérrela hasta que se proceda a su lavado.</li> <li>4. Lávese las manos.</li> </ol>	<p><b>Recuerda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Al llegar a las instalaciones se deberá desechar o guardar el tapabocas utilizado y proceder a cambiarlo por uno suministrado por la Organización.</li> <li><input type="checkbox"/> No tocar el tapabocas durante su uso y en caso de hacerlo lávese las manos antes y después de manipularlo.</li> <li><input type="checkbox"/> Mantener en el tapabocas guardado en una bolsita o empaque especial.</li> <li><input type="checkbox"/> Cámbielo cada vez que este roto, sucio o húmedo.</li> <li><input type="checkbox"/> Los tapabocas de tela deben lavarse con agua y jabón diariamente.</li> <li><input type="checkbox"/> No reutilice tapabocas convencionales y KN95</li> <li><input type="checkbox"/> No deje los tapabocas encima de cualquier superficie por el riesgo de contaminarse.</li> </ul>
---	---	---

**¡UNIDOS NOS CUIDAMOS!**